

SÅ ANVÄNDER DU TERROSA®-PENNAN

En guide till din dagliga injektion med Terrosa®-pennan.
Följ stegen noga. Kontakta din sjuksköterska om du har frågor.


Du har fått den här guiden av din läkare/sjuksköterska.




Terrosa
teriparatid 20 µg/80 µl

SÅ TAR DU DIN DAGLIGA INJEKTION

1. Börja med att tvätta händerna noga.
2. Ta av skyddshatten och skruva på nålen på pennan.
3. Vrid doseringsknappen medurs tills det tar stopp.

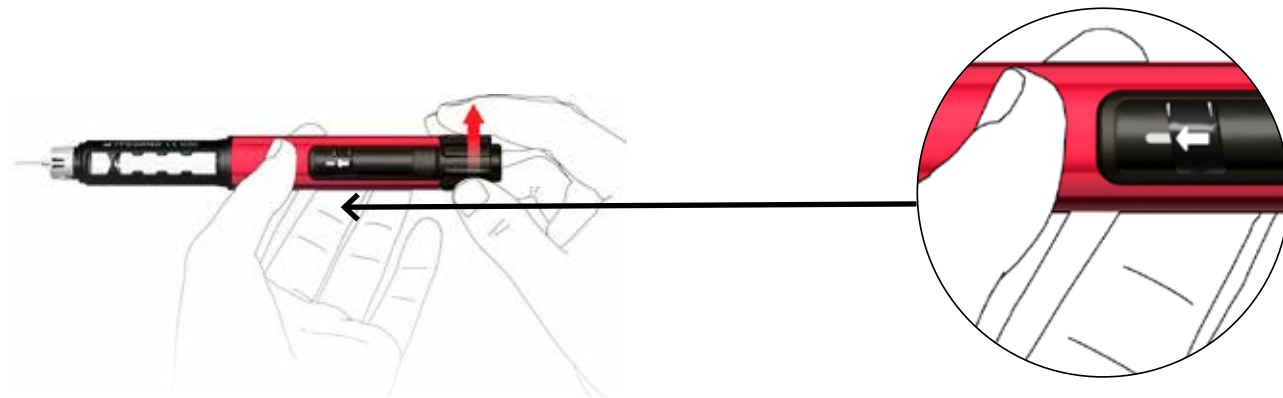

4. Kontrollera i dosfönstret att pilsymbolen och indikatorstrecket är i samma linje.



5. Ta tag i huden på låret eller magen och stick in nålen lodrätt. Förhindra att nålen böjs eller bryts. Vinkla inte pennan efter det att nålen har satts in i huden. Tryck på injektionsknappen tills doseringsindikatorn har återgått till startpositionen. Håll nålen inne i ytterligare 6 sekunder.

Lägg nålen i en kanylbox efter du använt den. Lämna boxen och de tomma ampullerna till Apoteket.

6. Skruva av nålen, sätt på hatten på pennan och lägg tillbaka pennan (med den insatta ampullen) i kylskåpet.

SÅ BYTER DU NÅL

SÅ BYTER DU NÅL

- Börja med att tvätta händerna noga med tvål.
- Kontrollera att det sitter en ampull i pennan.

1. Dra av skyddsfolien på nålen.



2. Skruva fast nålen medurs. Se till att nålen sitter korrekt och stadigt i ampullhållaren.



3. Ta bort den yttre **nålskyddet** och spara det.



4. Ta bort och släng det inre nålskyddet.



5. När du tagit din dagliga injektion, sätt på det yttre nålskyddet, skruva av nålen och släng den i en kanylbox.

SÅ BYTER DU AMPULL

SÅ BYTER DU AMPULL

Ta bort den tomma ampullen. Sätt i en ny ampull med ampullens metalliska lock först. Skriv ner datumet för första injektion varje gång du byter ampull. Detta hjälper dig att hålla reda på när de 28 dagliga doserna per ampull har använts.

1. Skruva av ampullhållaren. Ta bort den tomma ampullen



2. Sätt in en ny ampull med ampullens metalliska lock först.



3. Tryck försiktigt den gängade kolvstängan tillbaka in i pennans hölje så långt det går.



4. Fäst ampullhållaren i höljet genom att vrida den tills det tar stopp.




DET HÄR ÄR DIN TERROSA®-PENNA



- 1. Skyddshatt
- 2. Ampullhållare

- 3. Gängad kolvstång
- 4. Visningsfönster
- 5. Doseringsknapp
- 6. Injektionsknapp
- 7. Hölje

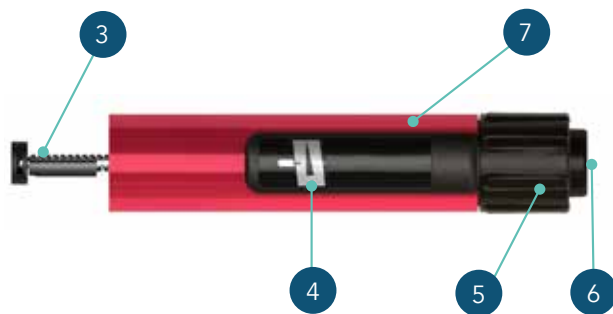

- Varje ampull innehåller 28 doser a 20 mikrogram (motsvarande 80 mikroliter).
- TERROSA®-pennan har en livslängd på två år.
- Garantin omfattar tillverknings- och materialfel av din TERROSA®-penna under två år från att du fick pennan.



- 8. Yttre nålskydd
- 9. Inre nålskydd
- 10. Skyddsfolie
- 11. Terrosa®-ampull

VIKTIGT ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ!

- Använd en ny nål varje gång du tar din injektion
- Använd inte pennan om lösningen är grumlig, kontakta då ditt apotek eller sjuksköterska
- Förvara alltid din Terrosa-penna i kylskåpet
- Ska du ta blodprover måste det vara minst 16 timmar efter din sista injektion
- Ampullen ska bytas efter 28 dagar
- Terrosa-pennan håller hela behandlingstiden



Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Terrosa används för att behandla osteoporos hos vuxna. Osteoporos är en sjukdom, som gör att benen i kroppen blir tunna och sköra. Sjukdomen är särskilt vanlig hos kvinnor efter menopaus, men kan även förekomma bland män. Osteoporos är också vanligt hos patienter som får läkemedel som kallas kortikosteroider. Ska ej användas till barn eller ungdomar (under 18 år). Varningar och försiktighet: Terrosa kan öka nivån av kalcium i blodet eller urinen. Tala med läkare innan eller under tiden du använder Terrosa om du ständigt har illamående, kräkningar, förstoppning, låg energi eller muskelsvaghet, lider av njursten eller har haft njursten tidigare eller lider av njurproblem. Tala också om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. En del patienter blir yra eller får en snabb hjärtfrekvens efter de första doserna av Terrosa. Injicera Terrosa där du snabbt kan sitta eller ligga ned om du blir yr. Om du känner dig yr, ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner förrän du känner dig bättre. Använd inte Terrosa om du är gravid eller ammar. Om du är en fertil kvinna ska du använda ett säkert preventivmedel under behandling med Terrosa. Om du blir gravid under behandling med Terrosa ska behandlingen med Terrosa avslutas. Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta Terrosa. Den innehåller information som är viktig för dig. Förkortad information baserad på bipacksedel daterad 2019-03-26. För mer information se www.fass.se. För fullständig information, se Terrosa bipacksedel.

Om du har några frågor om Terrosa® eller din behandling kan du alltid kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Du är också välkommen att kontakta Gedeon Richter per telefon: 08-506 394 76 eller via e-post: medinfo.se@gereonrichter.eu



GEDEON RICHTER

Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm. T: 08 611 24 00.