

Hvordan bruke Bemfola ferdigfylt engangspenn




Gjør følgende forberedelser:

Vask hendene

Ta injeksjonen til samme tid hver dag

Ta pennen ut av kjøleskapet 5–10 minutter før du skal bruke den

Delene som pennen består av

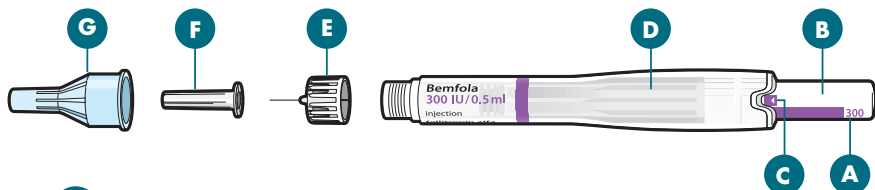

E Nål

F Indre nålebeskyttelse

G Ytre nålebeskyttelse

A Doseringsmerke

B Doseringsstav


C Doseringsvindu med aktiveringsmerke

D Beholder med legemiddel

Gjør klar pennen til injeksjon


Trekk av papirbeskyttelsen på nålen.

Hold pennen som vist på bildet for å unngå å trykke på doseringsstaven. Trykk fast nålen på pennen slik at den sitter godt.

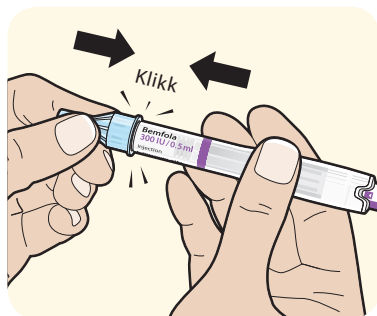


Fjern den ytre og indre nålebeskyttelsen.

Ta vare på den ytre beskyttelsen, som du trenger etter injeksjonen.

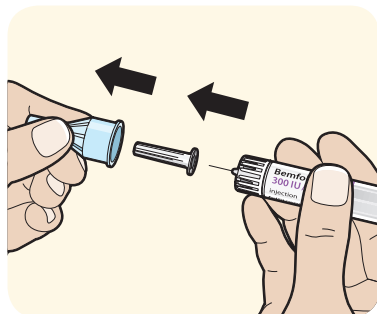


Hold pennen slik at nålen peker opp.¹
Trykk på doseringsstaven til den stopper.
Aktiveringsmerket forsvinner, og det kommer ut væske (væskemengden kan oppleves som stor, men det er helt normalt).² Ikke bruk pennen hvis det ikke kommer ut væske – ta i stedet en ny penn.

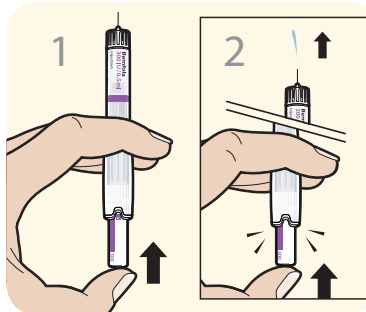


Stille inn dosen

Drei på doseringsstaven inntil den foreskrevne dosen er innstilt og vises i doseringsvinduet.
Pennen er nå klar til injeksjon.

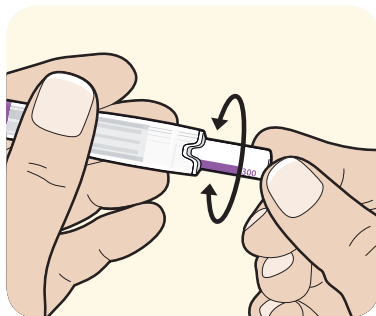


Injisere dosen

Injiser løsningen umiddelbart i underhudsfettet (vanligvis i nedre del av magen) slik du har fått beskjed om fra lege eller sykepleier.
Hold i huden og før inn nålen. Obs! Unngå å trykke på doseringsstaven når du stikker inn nålen!

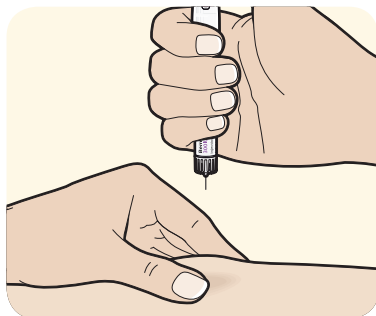


Injiser løsningen ved å trykke på doseringsstaven til det stopper opp. I doseringsvinduet vises da kun tallet for den injiserte dosen – selve doseringsmerket er ikke lenger synlig. Slipp huden og vent i 5 sekunder før du trekker ut nålen.

Etter injeksjonen: Sett den ytre nålebeskyttelsen på nålen, og kast pennen og nålen i en lukket beholder (for eksempel brusflaske eller melkekartong). Beholderen kastes i restavfall.

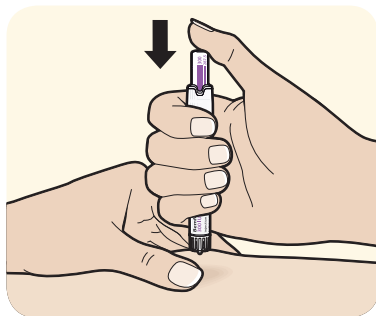

Oppbevares i kjøleskap (2–8 °C). Må ikke fryses. Kan tas ut av kjøleskapet og oppbevares ved romtemperatur (maks 25 °C) i opptil 3 måneder innenfor holdbarhetstiden.

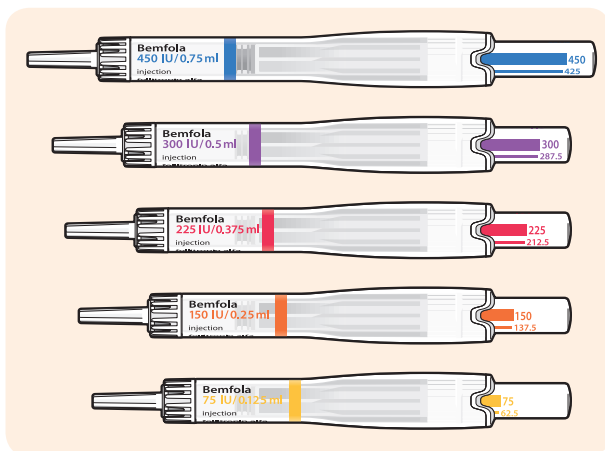

Bemfola 75 IE 0,125 ml	Bemfola 150 IE 0,25 ml	Bemfola 225 IE 0,375 ml	Bemfola 300 IE 0,5 ml	Bemfola 450 IE 0,75 ml
75 IE	150 IE	225 IE	300 IE	450 IE
62,5 IE	137,5 IE	212,5 IE	287,5 IE	425 IE
50 IE	125 IE	200 IE	275 IE	412,5 IE
37,5 IE	112,5 IE	187,5 IE	262,5 IE	400 IE
	100 IE	175 IE	250 IE	375 IE
	87,5 IE	162,5 IE	237,5 IE	350 IE
	75 IE	150 IE	225 IE	337,5 IE
				325 IE
				300 IE

Detaljert informasjon om dette legemiddel finnes på:

www.felleskatalogen.no og nettsiden til det europeiske legemiddelbyrået (EMA) – <http://www.ema.europa.eu>

En detaljert animert instruksjonsfilm er tilgjengelig på www.youtube.com

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker er:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Ungarn/Ungern/Unkari

Gedeon Richter Nordics AB

Norra Stationsgatan 61, 113 43 Stockholm, Sweden

Tel: +47 210 33 390 • medinfo.no@gedeonrichter.eu